

血管年齢測定の使用方 (1) Engels

1



(電源ON)

- (1) 最初に矢印の電源を入れます。
- (2) 電源を入れる際、ピツという音を確認したら、次の画面に切り換わるまで待ちます。その間は、黒い画面が続きます。
- (3) しばらくすると、青い画面に切り換わった時に、「起動中です。しばらくおまちください。」と、でたら次の画面に切り換わります。

※ 次の画面に切り換わるまで1分ほどかかります。

2



(起動画面)

- (1) 青い画面から初期画面に換わります。
- (2) 画面はタッチパネルになっています。画面をタッチすると、測定画面に切り換わります。

※ すぐにタッチをして、切り換えると画面が固まることがあります。少し間をおいてから操作をしましょう。

3



(測定画面)

測定画面が表示されたら

今度は、測定の準備をしましょう。

血管年齢測定の使用方 (2) Engels

4




(性別・年齢を入力)

- (1) まず最初に、赤外センサーという機械に、左中指を入れます。
※ 軽くのせるだけなので安心です。
- (2) 次に、画面がタッチパネルになっているので、性別・年齢の順に入力していきます。
- (3) 最後に、18秒のタッチパネルを押し、いよいよ測定開始。

※ 18~75歳の方が測定対象年齢です。

5

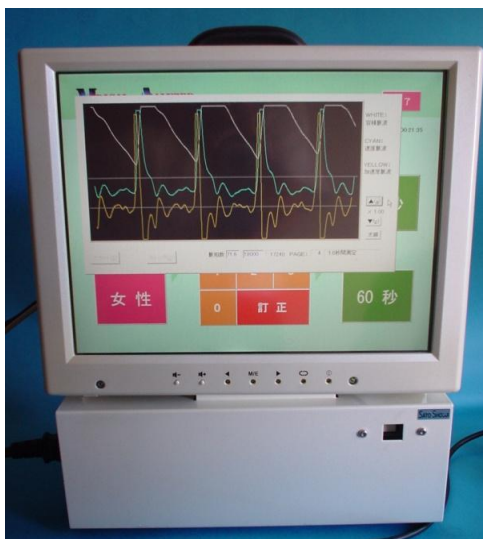

(測定)

測定中です。



波形画面がでます。

※ お医者さんから薬を頂いている方
不正脈がある方等、測定ができない場合があります。ご了承下さい。

6



(決果表示)

・画面に決果が表示されました。


※続けて測定する場合は、再測定 または、
中止ボタンにより測定画面に戻って下さい。

決果表示に、
実年齢・脈白数・血管年齢・
波形指数・血管老化偏差値が
表示されます。

印刷ボタンを押す(繰り返し)

血管年齢測定の使用方 (3) Engels

7

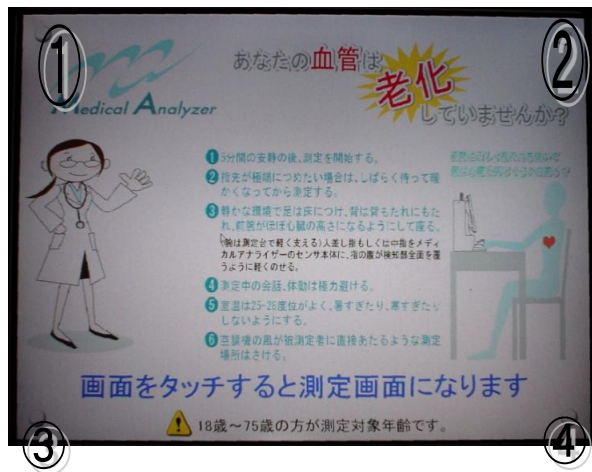


(終了方法)

前画面で終了タッチ

画面の4隅を "Z形" に順番に
① ② ③ ④ タッチして下さい。

※なるべく画面の隅を押して下さい。

8

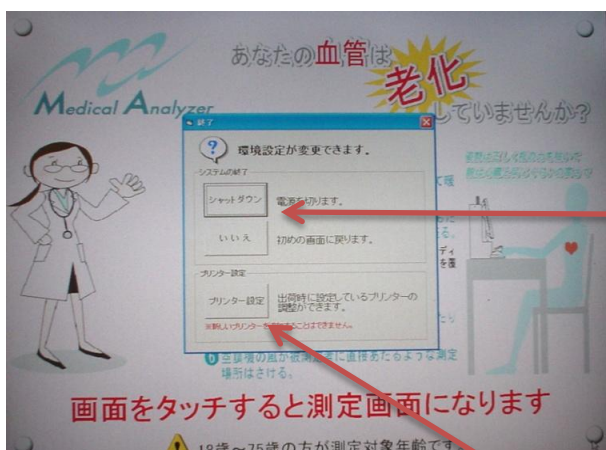

(電源をOFF)

画面中央にメッセージが表示
されます。シャットダウンボタ
ンを押し、電源を切って下さい。

プリンター設定
プリンターを選択設定

印刷用紙(コピー)は、各イベント店で用意してください。