


◆◆◆ 操作 方 法 ◆◆◆ ①

※本製品では18歳未満の方の測定はできません。

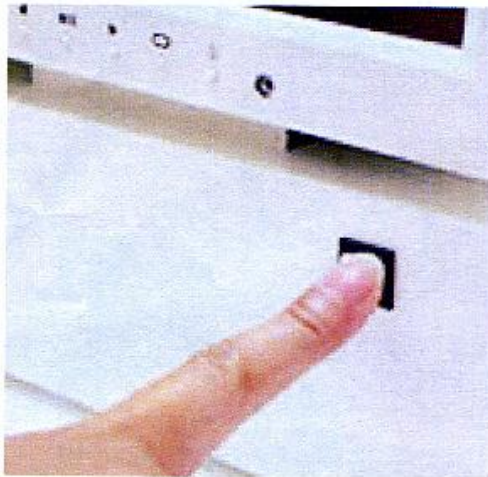

①電源ON

・本体の電源スイッチを押すことにより、本機が稼動します。

血管年齢チェックの画面が表示されるまで、しばらくお待ちください。



②起動画面

・初期画面です。画面をタッチすると測定画面が表示されます。



③性別、年齢を入力

・性別、年齢を入力し、指に力を入れずセンサーに軽く置き、測定秒数を押して測定を始めます。

通常は18秒の測定で問題ありませんが、脈波が安定しない方、より正確なデータが必要な場合は60秒で測定を行ってください。


※18歳～75歳の方が測定対象年齢です。



操作方法



②

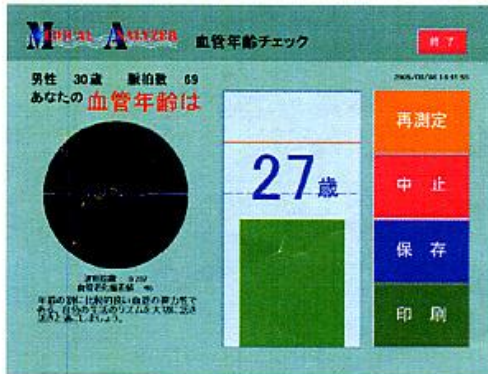

④結果表示

・画面に測定結果が表示されます。
印刷する場合、印刷ボタンを押す
続けて測定する場合は、再測定ま
たは中止ボタンにより測定画面に
戻って下さい。

※「保存ボタン」は測定者のデータ管理機能を有するものではありません。集計データの閲覧には別途キーボードおよびマウスが必要です。



終了方法

①終了ボタンを押して起動画面に戻ります。



②画面の4隅を“Z形”に順番にタッチしてください。
(なるべく画面の隅を押してください)

③画面中央にメッセージが表示されます。シャットダウンボタンを押し、電源を切って下さい。

